


ANEXO III

Previo a utilizar un barbijo o CBN, higienícese y desinfecte las manos, según ANEXOS I y II.



1. Retire el protector del envase.

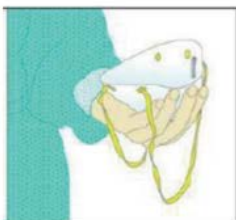

2. Coloque la máscara sobre la palma de la mano con los elásticos libres. No tocar el interior del mismo.



3. Coloque la máscara sobre su cara con la pieza nasal sobre su nariz. Pase el elástico superior sobre su cabeza.



4. Pase el elástico inferior y colóquelo debajo de la oreja y sobre el cuello.



5. Ajuste los costados de la nariz utilizando los dedos.



6. Ajuste correctamente la máscara.

IMPORTANTE.

- Para verificar que el barbijo se encuentra correctamente colocado, ubique sus manos como se indica en el punto 5, inhale y exhale suavemente, de ser necesario ajuste el pliegue de la nariz o los elásticos.
- Nunca manipular el barbijo con las manos sucias.
- Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente/estructura.

USO CORRECTO DEL CBN.

- No tocarlo mientras se esté usando, solo manipular por las tiras sujetadoras.
- Úselo cubriendo desde la nariz hasta la barbilla, no dejar espacios o huecos.
- Los CBN ofrecen una protección limitada y funcionan para cuidar al otro, siempre combinado con la higiene y desinfección de manos y el distanciamiento social (1,5 m.)
- Si usas anteojos, los deben colocar por encima del pliegue del CBN para evitar se empañen los cristales.
- Procura tener 2 (dos) unidades, uno para el trayecto desde y hacia tu casa y el otro para utilizar durante la jornada laboral.
- Cuando no lo utilices (dentro de tu domicilio), debes lavarlos con agua caliente y jabón blanco o neutro, colgándolos para su secado y aireado, guardándolos en un lugar limpio y desinfectado.



USO INCORRECTO DEL CBN.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo III

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.